



OROLIN®Multisept Plus

Dezinfectant concentrat cu acțiune puternică pentru instrumentar medical inclusive ce lutilizat în medicina dentară.



Scopulpropus



OROLIN®Multisept Plus este un produs concentrat cu acțiune puternică pentru dezinfectarea și curățarea manuală a instrumentarului medical inclusive cel utilizat în medicina dentară fabricat din oțel inoxidabil, carbura de tungsten, suprafața abrazivă de diamant, titan, carbura de siliciu și silicon. De asemenea, este potrivit pentru instrumentarul rotativ sensibil la alcool. Orolin® Multisept Plus nu conține aldehide, fenolisiclor.

Domeniul de utilizare



Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul anatomiilor și al medicinei dentare de către personal care deține cunoștințe specifice pentru dezinfectia dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienți.

Instrucțiuni de folosire



Pentru protecția dumneavoastră, purtați un halat de laborator, mănuși pentru menaj și ochelari de protecție. Preparați soluția de lucru conform tabelului de dozare. Scufundați complet instrumentele și respectați timpul de contact. După dezinfectare, clătiți bine instrumentele sub jet de apă potabilă timp de 10 secunde. Verificați vizual instrumentele după dezinfectare pentru a vedea agenții de contaminare. Dacă este necesar, îndepărtați agenții de contaminare cu o perie și repetați procesul de dezinfectare. Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau atunci când este vizibil contaminată. Soluția dezinfectantă este de asemenea potrivită pentru utilizarea într-un dispozitiv de curățare cu ultrasunete. Respectați recomandările de reprocesare ale producătorului instrumentarului. O listă de materiale compatibile și incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave care apar în legătură cu Dispozitivul Medical ar trebui raportate producătorului sau autorității competente.

Atentionare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu este destinat pentru dezinfectarea finală a dispozitivelor medicale semi critice și critice. Sterilizați dispozitivele medicale după dezinfectare. Nu amestecați cu alte produse. Pentru eficacitatea virucidă, efectuați dezinfectarea doar pe instrumentele curățate anterior.

Manipulare



PERICOL H302 Nociv în caz de înghitire. **H314** Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. **H373** Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. **H410** Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. **P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/protecție pentru față. **P301 + P312 ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE:** SUNAȚI LA UN CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu va simțiți bine. **P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):** Scoateți imediat toate îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceti duș. **P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:** Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P391** Colectați scurgerile de produs. **P501** Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.



Depozitare



A se pastra intr-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: <30°C.

Proprietăți fizice



Stare fizica: Lichid limpede, ușor vâscos	Valoare pH: 11.5-13.0
Culoare: Albastru	Termen de valabilitate 48 luni (recipient ne-deschis)
Miros: Aromatic	

Compoziție în 100g



100g conțin 9,1g alchilamină, 3,6g clorură de didecildimetilamoniu, inhibitori de coroziune, substanțe auxiliare și apă.



Spectru de eficiență

Bactericid	EN13727:2012+A2:2015* EN14561:2006*	2% în 5min
Tuberculocid	EN14348:2005# EN14563:2008*	2% în 5min
Micobactericid	EN14348:2005# EN14563:2008*	2% în 5min
Levuricid	EN13624:2013* EN14562:2006#	2% în 5min
Virusi cu înveliș	EN14476:2013+A1:2015* EN17111:2018#	2% în 5min
Virucid	EN14476:2013+A1:2015^ EN17111:2018#	2% în 15min

^ Testat cu încărcătură organic scăzută / * Testat cu încărcătură organic ridicată / # Testat cu încărcătură organic scăzută și ridicată.

Tabel de dozare



	 Concentrat	+	 Apa	 Timp
2%	20ml	+	980 ml	5min
*2%	20ml	+	980 ml	15min

*Complet virucid

Compatibilitate



Polimer acetal	Compatibil
Sticlă acrilică	Compatibil
Aluminiu	Compatibil
Carbid	Compatibil
Ceramică	Compatibil



Clorura de polivinilclorurata	Compatibil
Diamant (acoperire de carbon, similara diamantului)	Compatibil
Diamant (acoperit cu aur)	Compatibil
Diamant (acoperire cu nitrit de zirconoiu)	Compatibil
Suprafataabraziva de diamant	Compatibil
Metal dur	Compatibil
Poliamida	Compatibil
Tereftalat de polibutilena	Compatibil
Polieterimida	Compatibil
Polieteliena	Compatibil
Tereftalat de polietilena	Compatibil
Oxid de polifenilsulfona	Compatibil
Polifenilsulfona	Compatibil
Polipropilena	Compatibil
Polisulfona	Compatibil
Clorura de polivinil	Compatibil
Florura de polivinilidena	Compatibil
Portelan	Compatibil
Rodiu	Compatibil
Carbura de silicon	Compatibil
Silicon	Compatibil
Otelinoxidabil	Compatibil
Otel	Compatibil cu restrictii
Elastomer termoplastic	Compatibil
Poliuretantermoplastic	Compatibil
Titan	Compatibil
Carbura de tungsten	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperit cu efect de cameleon)	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperit cu suprafata abraziva de diamant)	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperit cu nitrit de zirconiu)	Compatibil
Polietilena cu incarcatura moleculara ridicata	Compatibil
Dioxid de zirconiu	Compatibil

Ambalaj



CH-060005	Flacon de 250ml
CH-060016	Flacon de 1L
CH-060020	Flacon de 2L
CH-060025	Canistra de 5L



Producător, Reprezentant UE, Importator, Distribuitor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia

 info@oroclean.com •  +41(0)442264444 •  www.oroclean.com



OroCleanChemies.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 13000 Praha 3 • Republica Ceha 
info@oroclean.cz •  www.oroclean.cz