

**MYZOTECT®-TINCTURE**

Aktivierungs- und Pflegemittel

D

Myrrhe und Benzoin sind seit Jahrhunderten bekannt. Die sirupartige MYZOTECT®-TINCTURE haftet lange auf der Mundschleimhaut, pflegt diese und zwingt sie zu reagieren.

**MYRRHE** - gewebefestigend, adstringierend und blutstillend, u. a. bei Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

**BENZOIN** - keimtötend, antiseptisch

**ALOE** - Wirkstoffkomplex, seit Jahrhunderten bekannt

MYZOTECT®-TINCTURE dient zur Festigung und Pflege der Mundschleimhaut und kann unter anderem nach jeder PA-Behandlung, jedem chirurgischen Eingriff, bei Entzündungen, Druckstellen, Aphthen und anstelle des Zahnfleischverbandes - oder darunter - aufgetragen werden.

- Angenehmer Geschmack und Geruch
- Kein Brennen nach dem Auftragen
- Lange Verweildauer im Mund

MYZOTECT®-TINCTURE kann zur Pflege der Mundschleimhaut mit einem Wattestäbchen in einer oder mehreren Schichten großzügig auf die möglichst trockene Mundschleimhaut aufgetragen werden. In der Arztpraxis kann die MYZOTECT®-TINCTURE aus der Flasche in eine Einmalspritze aufgezogen und mit stumpfen Kanülen aufgetragen werden.

**Inhaltsstoffe:**

Commiphora myrrha	PEG 300
Styrax benzoin	Colophonium
Aloe barbadensis	Hydroxypropylzellulose

Flasche mit 50 ml Ref. 155 005

Flasche mit 5 x 5 ml Ref. 155 006

Flasche mit 10 x 5 ml Ref. 155 007

H10102-2

**MYZOTECT®-TINCTURE**  
Oral Care Product

**Myrrh and benzoin are known since centuries. The highly viscous MYZOTECT®-TINCTURE adheres to the oral mucosa for a long time and causes a positive reaction.**

**MYRRH** - tissue firming, astringent and styptic. For the treatme of inflammations of the oral and pharyngeal cavity e.g.

**BENZOIN** - germicidal a and antiseptic

**ALOE** - active ingredient that is known since decades

**MYZOTECT®-TINCTURE** firms and cares for the oral mucosa and can be ap-plied after each periodontal treatment and every surgical procedure. Also for the treatment of inflammations, pressure sores, aphthae and in lieu of - or underneath - a periodontal dressing.

- Pleasant taste and smell
- Does not burn
- Adheres to the mucosa for a long time

**Application:**

For the care of the oral mucosa apply **MYZOTECT®-TINCTURE** with a cotton swab in one or more layers. The area should be as dry as possible. In the dental practice the **MYZOTECT®-TINCTURE** may also be filled in a disposable syringe and applied with blunt cannulae.

**Ingredients:**

Commiphora myrrha	PEG 300
Styrax benzoin	Colophonium
Aloe barbadensis	Hydroxypropylcellulose

**Bottle 50 ml**                      **Ref. 155 005**

**Bottle 5 x 5 ml**                 **Ref. 155 006**

**Bottle 10 x 5 ml**               **Ref. 155 007**