

Fuji PLUS



1
Retirez la restauration provisoire et nettoyez soigneusement la dent.



2
Vérifiez l'ajustage et l'occlusion.



3
Retirez la restauration et sablez à l'oxyde d'aluminium 50 µm (s'il n'a pas été fait en laboratoire).



4
Rincez et séchez la restauration. Remarque : pour une adhésion optimale, appliquez le G-Multi Primer sur la restauration (facultatif).



5
Rincez et séchez la dent préparée (ne pas déshydrater).



6
Optionel: Appliquez GC Fuji PLUS CONDITIONER pendant 20 secondes.




7
Rincez soigneusement à l'eau et séchez (ne pas déshydrater).



8
Appliquez le Fuji PLUS directement dans la restauration.



9
Positionnez immédiatement sur la dent préparée. Maintenez une pression modérée.

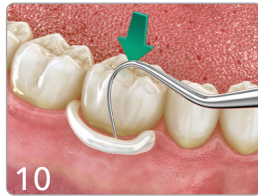

10
Retirez les excès de ciment tout en maintenant une pression modérée lorsque celui-ci est dans sa phase caoutchouteuse.



11
Procédez à la finition après la mise en place de la restauration. Capsule: après 4'15" / Mélange manuel: après 4'30" / EWT: 5'45"

