



OROMED® Gel

Gel dezinfectant pentru mâini, cu spectru larg, ce conține hidratanți, vitamine și substanțe anti-îmbătrânire.

- Distrug 101 agenți patogeni
- Spectru larg de eficiență
- Fără miros sau coloranți
- Excelentă compatibilitate cutanată
- Testat dermatologic

OROMED® Gel este un gel hidroalcoolic gata preparat, cu spectru larg antimicrobian, pentru dezinfecția chirurgicală și igienică a mâinilor și antebrățelor. Formula limpede, neaderentă și fără reziduuri este plăcută la utilizare, se usucă repede și lasă mâinile catifelate. OROMED® Gel încorporează un sistem unic de protecție a pielii, constituit din substanțe de hidratare, emolienți, vitamine și compuși cu acțiune calmantă, care apără chiar și mâinile cele mai sensibile de efectele dezinfecțiilor frecvente. OROMED® Gel oferă protecție împotriva uscării și iritației. Conținutul ridicat de antioxidanți și substanțe anti-îmbătrânire neutralizează radicalii liberi nocivi care determină îmbătrânirea prematură. OROMED® Gel nu conține parfumuri și coloranți.

Gelul este biodegradabil.



- Pentru dezinfecția mâinilor și a antebrățelor



Utilizare

Pentru dezinfecția igienică a mâinilor, aplicați 3 ml de soluție nediluată pe toată suprafața mâinilor uscate și frecați timp de 30 de secunde. Respectați procedura standard, în conformitate cu EN 1500. Pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor, aplicați soluția pe toată suprafața mâinilor uscate și frecați degetele, mâinile și antebrățele uscate timp de 1.5 minute, utilizând 2x 3 ml. Respectați procedura standard, în conformitate cu EN 12791. Păstrați mâinile umede în timpul aplicării.

Spectru de eficiență / Timp de expunere



Bactericid	10-15 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	10 secunde
Tuberculocid	15 secunde
Micobactericid	30 secunde
Levuricid	15 secunde
levuri rezistente la antibiotice	15 secunde
Fungicid	2 minute
Virusuri încapsulate	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul hepatitei B	15 secunde
Virus hepatitei C	15 secunde
Virus herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virus Vaccinia	15 secunde
Virusuri neîncapsulate	5 minute
Adenovirus	30 secunde
Norovirus	60 secunde
Poliovirus	5 minute

Conform cu EN 1500, EN 12791, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, Norme RKI / DVV. Testat dermatologic.





Compatibilitate



Polietilenă
Polipropilenă
Mănuși din latex
Mănuși din nitril
Fontă
Aluminiu

Compatibil
Compatibil
Compatibil
Compatibil
Compatibil
Compatibil

Pericol



H225 Lichid și vapori foarte inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P280 Purtați echipament de protecție a ochilor și a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Compoziție per 100 g



52.8 g etanol, 19.0 g 1-propanol,
2.8 g izopropanol, hidratante,
emolienți, acetat de vitamina E, pantenol,
bisabolol, agenți de gelifiere

Proprietăți fizice



Stare de agregare:	Gel transparent, ușor vâscos
Culoare:	Incolor
Miros:	De alcool
Valoare pH:	Neutru.
Termen de valabilitate:	36 luni (recipient nedeschis) Nu se aplică. (soluție de lucru în zu)

Formă de prezentare



Flacon de 500 ml cu pulverizator,
Flacon de 500 ml (EURO), Flacon de
1 litru (EURO), Cartuș de rezervă de 1 litru
pentru dozatorul myArtisto, canistră de 5
litri

Folosiți dezinfectantele în condiții de
siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și
informațiile despre produs înainte de
folosire.

Numar autorizatie produs bioci d
CHZN1698

Distribuitorul dvs. local



DEZIMED+

S.C. DEZIMED SRL
Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79,
parter, sector 5
50713 Bucuresti
România
Telefon: +40 21 411 60 01
Fax: +40 21 411 91 17
office@dezimed.ro
www.dezimed.ro