

Because Quality Matters

DENTIRO® Zero

Dezinfectant rapid fara alcool gata de utilizare
pentru dezinfectia si curatarea dispozitivelor
medicale nainvazive cu suprafete sensibile



Scopul Propus



DENTIRO® Zero este o soluție gata de utilizare, fără alcool pentru dezinfectarea și curățarea rapidă a dispozitivelor medicale neinvazive cu suprafețe sensibile, cum ar fi scaunele stomatologice. DENTIRO® Zero este adecvată pentru dezinfectarea materialelor sensibile la alcool, cum ar fi pielea sintetică, Plexiglas® și PVC.

Domeniu de utilizare



Produsul este destinat utilizării profesionale în domeniul sănătății și al medicinei dentare de către personal care detine cunoștințe specifice despre dezinfectia dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienți.

Instructiuni de utilizare



Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de protecție. Umeziți complet și ștergeți întreaga suprafață a dispozitivului medical. Lăsați dezinfectantul să acționeze și respectați timpi de expunere. Utilizați numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Înainte de prima utilizare, testați compatibilitatea materialului prin aplicarea dezinfectantului pe o mică zonă puțin vizibilă. O listă a materialelor compatibile și incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți sigur de compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul medical trebuie raportate producătorului sau autorității competente.

Atentionare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu se utilizează cu dispozitive medicale invazive. Nu se amestecă cu alte produse. Asigurați-vă că orice urma de contaminare a fost îndepărtată de pe suprafața obiectului înainte de a aplica dezinfectantul.

Manipulare



Niciun cuvânt de semnalizare conform Regulamentului (CE) 1272/2008. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P273 Evitați dispersarea în mediu. P305+P351 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.

Depozitare



A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.



Proprietati fizice



Stare fizică: Lichid limpede, nevâscos	Valoarea pH-ului: 8.2 - 8.8
Culoare: incolor	Perioada de valabilitate: 48 luni (recipient nedeschis)
Miros: Mere	

Compozitie in 100 g



100 g conțin 0,4 g clorură de benزالconiu, 0,4 g N-alchilaminopropil glicină, auxiliari și apă.

Spectru de eficienta



Bactericid	EN 13727:2012+A2:2015*, EN 16615:2015^	60 sec
Tuberculocid	EN 14348:2005^	60 min
Mycobactericid	EN 14348:2005^	60 min
Fungicid	EN 13624:2013*, EN 16615:2015^	60 sec
Virusuri cu invelis	EN 14476:2013+A1:2015*	15 sec
Virucid	EN 14476:2013+A1:2015^	60 min

^ Testat sub încărcătură organică scăzută / * Testat sub încărcătură organică ridicată

Compatibilitate



Polimer acetal	Compatibil
Sticla acrilica	Compatibil
Acrilonitril butadien stiren	Compatibil
Piele artificiala	Compatibil
Ceramica	Compatibil
Clorura de polivinil clorurat	Compatibil
Poliamidă	Compatibil
Tereftalat de polibutilenă	Compatibil
Policarbonat	Compatibil
Polieterimidă	Compatibil
Polietilenă	Compatibil
Tereftalat de Polietilen	Compatibil
Oxizi de polifenilen	Compatibil
Polifenilsulfonă	Compatibil
Polipropilenă	Compatibil
Polistiren	Compatibil
Polisulfonă	Compatibil
Clorura de polivinil	Compatibil
Fluorura de policarbonat de sodiu	Compatibil
Rodiu	Compatibil



Silicon	Compatibil
Otel inoxidabil	Compatibil
Otel	Compatibil
Elastomer termoplastic	Compatibil
Poliuretan termoplastic	Compatibil
Polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă	Compatibil

Ambalaj



CH-011004	Flacon de 250ml
CH-011100	Flacon de 1L
CH-011104	Canistra de 5L

Producator, Reprezentant UE, Importator, Distribuitor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia 
+41(0)44 226 44 44 •  info@oroclean.com •  www.oroclean.com



Oro Clean Chemie s.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Republica Ceha
 info@oroclean.cz •  www.oroclean.cz