

ISORAPID SPRAY®

Dezinfectant gata de utilizare pentru dezinfecția rapidă și curățarea dispozitivelor medicale neinvazive.



SCOPUL PROPUS



ISORAPID® Spray este un produs dezinfectant destinat dezinfectiei suprafetelor fara aldehida, gata de utilizare, pe baza de alcooli, pentru curatarea si dezinfectia prin stergere si pulverizare rapida a dispozitivelor medicale non-invazive, cum ar fi mesele de operatie, targi, stative pentru perfuzii si scaune utilizate in medicina dentara. Are un continut scazut de alcool mai mic de 50% care reduce semnificativ riscul de producere a alergiilor si a iritatiilor pielii, crescand in acelasi timp compatibilitatea cu materialele. ISORAPID® Spray are un parfum proaspat, floral.

Domeniul de utilizare



Produsul este destinat utilizării profesionale in domeniul sanatatii si al medicinei dentare de catre personal care detine cunoștințe specifice despre dezinfecția dispozitivelor medicale.
Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienți.

Instrucțiuni de folosire



Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de protecție. Umeziți complet și ștergeți întreaga suprafață a dispozitivului medical. Lăsați dezinfectantul să acționeze și respectați timpi de expunere. Utilizați numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Înainte de prima utilizare, testați compatibilitatea materialului prin aplicarea dezinfectantului pe o mică zonă puțin vizibilă. O listă a materialelor compatibile și incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți sigur de compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul medical trebuie raportate producătorului sau autorității competente.

Atentionare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu se utilizează cu dispozitive medicale invazive. Nu se amestecă cu alte produse. Asigurați-vă că orice urma de contaminare a fost indepartata de pe suprafata obiectului inainte de a aplicarea dezinfectantului.

Manipulare



PERICOL H226 Lichid și vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolență sau amețeli. P210 Tineti departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul bine închis. P261 Evitați să respirați fumul/ceața/vaporii/sprayul. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateti lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă acest lucru se poate face cu usurinta. Continuat sa clătiți. P501 Eliminati conținutul/recipientul respectant reglementările nationale si locale in vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.



Depozitare



A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.

Proprietăți fizice



Stare fizică: Lichid limpede, nevâscos	Valoarea pH-ului: neutru
Culoare: incolor	Perioada de valabilitate: 48 luni (recipient nedeschis)
Miros: de alcool, floral	

Compozitie in 100g



100 g conțin 20 g etanol, 28 g 1-propanol, 0,056 g compuși de amoniu cuaternar, material auxiliare și apă.



Spectru de eficienta

Bactericid	EN13727:2012+A2:2015*,EN16615:2015^	60sec
Tuberculocid	EN14348:2005*	60sec
Mycobactericid	EN14348:2005*	60sec
Fungicid	EN13624:2013*,EN16615:2015^	60sec
Virusuri cu invelis	EN14476:2013+A1:2015*	15sec
Virucid	EN14476:2013+A1:2015^	60sec

^ Testat sub încărcătură organică scăzută / * Testat sub încărcătură organică ridicată

Compatibilitate



Polimer acetal	Compatibil
Sticla acrilica	Nu este compatibil
Acrilonitril butadien stiren	Compatibil
Aluminiu	Compatibil
Piele artificiala	Compatibil
Clorura de polivinil clorurat	Compatibil
Poliamidă	Compatibil
Tereftalat de polibutilenă	Compatibil
Policarbonat	Compatibil
Polieterimidă	Compatibil
Polietilenă	Compatibil
Tereftalat de Polietilen	Compatibil
Oxizi de polifenilen	Compatibil
Polifenilsulfonă	Compatibil
Polipropilenă	Compatibil



Polistiren	Compatibil
Polisulfonă	Compatibil
Clorura de polivinil	Compatibil
Florura de policarbonat de sodiu	Compatibil
Rodiu	Compatibil
Silicon	Compatibil
Elastomer termoplastic	Compatibil
Poliuretan termoplastic	Compatibil
Polietilenă cu greutate moleculară ultra-înaltă	Compatibil

Ambalaj



CH-021005	Flacon de 250 ml
CH-021013	Flacon de 1L
CH-021020	Flacon de 1L
CH-021025	Canistra de 5L

Producător, Reprezentant UE, Importator, Distribuitor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia 
+41 (0)442264444 •  info@oroclean.com •  www.oroclean.com



Oro Clean Chemie s.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Republica Ceha
 info@oroclean.cz •  www.oroclean.cz

