

DENTIRO® Zero

MARCAJ CE 2460

Dezinfectant-detergent gata-preparat, rapid, fără alcool
Nu conține aldehyde sau fenoli!

Utilizat prin pulverizare sau ștergere pentru dezinfecția suprafețelor sensibile la alcool, inclusiv din piele naturală sau artificială, cauciuc și a suprafețelor sensibile din piele artificială, sticlă acrilică (tip Plexiglas®), plastic sensibil cum ar fi PVC moale sau cauciuc, a suprafețelor mici, mobilierului din salon (scaune, măsuțe, chiuvete, bazine pedichiură), accesoriilor manichiură/pedichiură/frizerie ce nu sunt contaminate cu sânge sau materii organice.

MOD DE UTILIZARE

Se aplică prin pulverizare ca spray sau prin impregnarea șervețelilor uscate DRY WIPES MAXI SOFT.®

- Desigilați capacul recipientului și/sau aplicați pompa pulverizatoare.
- Umeziți complet suprafața sau obiectul ce urmează a fi dezinfectat și lăsați substanța să acționeze (urmăriți timpii de expunere).
- Dacă este necesar, ștergeți suprafața sau obiectele cu un șervețel de unică folosință.
- Dispozitivele medicale ce intra în contact direct cu pielea și sunt dezinfectate cu Dentiro® Zero în mod regulat trebuie să fie șterse o dată pe zi cu o lavetă umedă pentru a preveni acumularea de produse biocide pe suprafața lor.
- Concentratii si spectru de actiune:

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotic	60 secunde
Tuberculocid	60 minute
Micobactericid	60 minute
Levuricid	60 secunde
Levuri rezistente la antibiotic	60 secunde
Virusuri cu invelis	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virus hepatita B	15 secunde
Virus hepatita C	15 secunde
Virus Herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virus Vaccinia	15 secunde
Virucid	60 minute
Adenovirus	30 minute
Norovirus	60 minute
Poliovirus	60 minute
Rotavirus	30 secunde

- In conformitate cu metodele standard SR EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615.
- Niciun cuvânt de semnalizare conform Regulamentului (CE) 1272/2008. H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P273 Evitați dispersarea în mediu. P305+P351 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate

disponibilă pe site-ul nostru.

➤ **Beneficiile dumneavoastră:**

- dezinfectantul fără conținut de alcool este indicat pentru aplicarea pe suprafețele sensibile.
- Spectru larg de activitate: activ asupra tuturor tipurilor de bacterii, fungi și virusuri.
- Timp scurt de acțiune. Acționează în 60 secunde asupra bacteriilor, ciupercilor și virusurilor cu înveliș.
- Nu conține coloranți ceea ce reduce semnificativ riscul de producere al alergiilor.
- Este testat în condiții dificile: dezinfectantul rămâne eficient în prezența unui grad ridicat de contaminare cu materie organică cum ar fi sânge sau alte fluide ce provin din corpul uman.
- Soluția este biodegradabilă și nu produce un impact negativ asupra ecosistemului.
- Este în conformitate cu Normele Europene.

➤ **Compatibil cu 210 materiale cum ar fi: polietilenă, polipropilenă, clorură de polivinil, sticlă acrilică, ceramica.**

➤ **Folosiți mănuși de protecție. Citiți instrucțiunile înainte de folosire!**

♦ **SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE.**