

ORO CLEAN® PLUS

Produs dezinfectant concentrat cu spectru larg de activitate destinat dezinfectiei, curăţării şi odorizării tuturor sistemelor de aspiraţie, scuiptoarelor, separatoarelor de amalgam.

MOD DE UTILIZARE

ORO CLEAN® Plus este un produs concentrat extrem de eficient destinat dezinfectiei şi curăţării sistemelor de aspiraţie, scuiptoarelor şi separatoarelor de amalgam. Datorita unei combinatii eficiente de agenti de curăţare şi dezinfectie, produsul îndepărtează cu succes biofilmul, previne depunerile şi asigură buna funcţionare a sistemului de aspiraţie al unitului dumneavoastră. ORO CLEAN® Plus are un parfum placut de menta proaspata. Produsul nu formeaza spumă.

Dezinfectaţi sau curăţaţi zilnic unitatea de aspiraţie sau conform reglementărilor locale. După procedurile chirurgicale şi înainte de dezinfectie, clătiţi bine cu apă unitatea de aspiraţie. Pentru dezinfectie, preparaţi 2 litri de soluţie de lucru, conform instrucţiunilor de pe etichetă. Pentru a măsura dozajul corect, folosiţi capacul ca recipient de măsurare. Aspiraţi 1,5 litri din soluţia de lucru utilizând OROCLEAN® Cup şi turnaţi 500 ml în scuiptoare. Lăsaţi să acţioneze 30 de minute. Clătiţi bine cu apă după dezinfectie. Nu este compatibil cu: aluminiul, cuprul, oţelul galvanizat, poliuretanul, Teflon®.

Spectru de activitate / Timpi de expunere

Bactericid/bacteria rezistente la antibiotic/levuricid	2% in 5 min.
Levuri rezistente la antibiotice	2% in 5 min.
Virusuri incapsulate /Virusul Hepatitei B	2% in 5 min.
Virusul Herpex simplex/HIV/ Vaccinia	2% in 5 min.
Virucid /Norovirus	2% in 60 min.
Adenovirus	2% in 30 min.
Bvdv	2% in 1 min.
Virusul hepatitei C	2% in 1 min.
Poliovirus	2% in 30min.

In conformitate cu metodele standard SR EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 14561, EN 14562.

**Concentraţie standard de utilizare 2% , adică 40 ml. la 1960 ml apă.
Din 2 litri soluţie concentrată, la concentraţia de 2%, se obţin 50 litri solutie de lucru.**

Avertizare:

H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. P301+P330+P331 IN CAZ DE INGHITIRE: caltiti gura. NU provocati vomă. P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELE (sau parul) : scoateti imediat toata imbracamintea contaminate. Clatiti pielea cu apa/faceti dus. P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. P391 Colectati scurgerile de produs. P501 Eliminati continutul/recipientul respectand reglementarile in vigoare.

**Soluția este biodegradabilă și nu prezintă un impact negativ asupra mediului
SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE.**