

OROLIN® Burbath

Acțiune în numai 60 secunde!

MARCAJ CE 2460

Domeniul sanitar (medical), medicină dentară, veterinar

OROLIN® Burbath este un produs gata preparat, fără aldehyde, pentru dezinfectia și curățarea tuturor instrumentelor rotative chirurgicale și dentare. OROLIN® Burbath are un spectru de activitate foarte larg și acționează foarte rapid: într-un singur minut, OROLIN® Burbath are acțiune bactericidă, tuberculocidă, micobactericidă, levuricidă, fungicidă și virucidă. Combinația dintre agenții ce dizolvă proteinele și tensidele cu acțiune multiplă, generează o putere mare de curățare a produsului

MOD DE UTILIZARE

Deșurubați capacul recipientului.

Turnați soluția gata de utilizare în cuva. Imersați instrumentarul astfel încât acesta să fie complet acoperit de soluție și lăsați să acționeze.

Nu clătiți frezele cu apă după utilizarea dezinfectantului. Lăsați-le să se usuce.

Inlocuiți soluție de lucru zilnic sau când este vizibil contaminată.

Nu este recomandat pentru aluminiu, cupru sau materiale sensibile la alcool.

Instrumentarul se scoate din soluție și se sterilizează, respectând recomandările producătorului.

Lăsați să acționeze conform timpilor de expunere:

Bactericid, bacterii rezistente la antibiotice	30 secunde
Tuberculocid, micobactericid	60 secunde
Fungicid	60 secunde
Ciuperci rezistente la antibiotice	30 secunde
Virusuri cu înveliș	15 secunde
BVDV, Virusul Hepatitei B, C	30 secunde
Virusul Herpes Simplex	30 secunde
HIV	30 secunde
Virusuri fără înveliș	60 secunde
Adenovirus	60 secunde
Poliovirus	60 secunde
Poliomavirus	30 secunde
Levuricid	30 secunde
Virucid	30secunde

În conformitate cu normele europene: SR EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN17111.

Atentie H226 Lichid și vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa de date de securitate disponibilă pe site-ul nostru.

Compatibilitate: Polietilenă, polipropilenă, instrumentar din oțel, freze dentare. Nu folosiți pe instrumentar din aluminiu, cupru, alamă. Folosiți numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Ușor biodegradabil.

Eliminați acest produs cu respectarea normelor naționale și regionale în vigoare, respecti legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. Cod deșeuri EWC nr. 070699 (Grup: deșeuri din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticilor). Cantități mici din acest produs (până la 500 ml/zi) pot fi eliminate prin sistemul centralizat de

canalizare. Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoiului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse pentru manipularea produsului însuși. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări.

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE !