



ORO CLEAN® Plus

Dezinfectant concentrat cu spectru larg, 3 in 1 pentru dezinfectia curatarea si dezodorizarea aparaturii stomatologice de aspiratie.



Scopul Propus



ORO CLEAN® Plus este un concentrat cu spectru larg pentru dezinfectia, curatarea si dezodorizarea unitatilor de aspiratie dentare si

boluri de scuipatoare. ORO CLEAN® Plus elimina mirosurile neplacute si lasa in urma un parfum proaspăt de mentă. Perfect pentru dezinfectia zilnică..

Domeniu de utilizare



Produsul este destinat utilizarii de catre profesionistii din domeniul sanatatii si al medicinei dentare de catre personal care detine cunostinte specific pentru dezinfectia dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienti.

Instructiuni de folosire



Pentru protectia dumneavoastra, purtati halat de laborator, manusi de unica folosinta si ochelari de protectie. Dezinfectati unitatea de aspiratie zilnic sau conform reglementarilor in vigoare. Clatiti bine unitatea de aspiratie cu apa dupa procedurile chirurgicale si inainte de dezinfectie. Se prepara 2 litri de solutie de lucru conform tabelului de dozare. Aspirati 1,5 litri de solutie de lucru si turnati restul de 500 ml in vasul scuipator. Lasati sa actioneze. Clatiti bine cu apa dupa dezinfectie. Nu este compatibil cu aluminiu, cupru, otel galvanizat si poliuretan. O lista de materiale compatibile si incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru web. Dacă nu sunteți sigur cu privire la compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave care au loc în legătură cu dispozitivul medical trebuie raportate producătorului sau autorității competente.

Atentionare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu se utilizeaza pe dispozitivele medicale invazie. Nu se amesteca cu alte produse. Asigurati-va ca murdaria a fost indepartata inainte de utilizare

Pericol



H290 Poate fi corosiv pentru metale. H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. P301+P330+P331 IN CAZ DE INGHITIRE: caltiti gura. NU provocati vomă. P303+P361+P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELE (sau parul) : scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus. P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti. P391 Colectati scurgerile de produs. P501 Eliminati continutul/recipientul respectand reglementarile in vigoare.



Depozitare

A se păstra într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. A se feri de lumina directă a soarelui, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.

Proprietati fizice



Stare fizică: Limpede, ușor vascos	Valoarea pH-ului: 10.0-12.0
Culoare: Galben	Perioada de valabilitate: 24 luni (recipient nedeschis)
Miros: aromatic	

Compoziție în 100 g



100 g contin 2.475 g N-(3- aminopropil)-N- dodecilpropan -1,3- diamină, 7.5 g compuși cuaternari de amoniu, agenți antispumanți, auxiliari și apă.

Tabel de dozare



	 Concentrat	+	 Apa	 Timp
2%	40 ml	+	1960 ml	5 min
*2%	40 ml	+	1960 ml	60 min



Bactericid	EN 13727:2012+A2:2015*, EN 14561:2006*	2% in 5 min
Levuricid	EN 13624:2013*, EN 14562:2006*	2% in 5 min
Virusuri cu invelis	EN 14476:2013+A1:2015*	2% in 5 min
Virucid	EN 14476:2013+A1:2015^	2% in 60 min

^ Testat sub încălzire organică scăzută / * Testat sub încălzire organică ridicată

Compatibilitate



Acrilonitril butadien stiren	Compatibil
Polietilenă	Compatibil
Polipropilenă	Compatibil
Polistiren	Compatibil
Clorura de polivinil	Compatibil



Ambalaj



CH-071020

Flacon 2L

CH-071025

Canistra 5L

Prodicator, Reprezentant UE, Importator, Distributor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia



+41(0)44 226 44 44 •



info@oroclean.com •



www.oroclean.com



Oro Clean Chemie s.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Republica Ceha



info@oroclean.cz •



www.oroclean.cz

