



OROLIN® Burbath

Produs gata de utilizare, pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor rotative stomatologice și chirurgicale



Scopul Propus



OROLIN® Burbath este un produs gata de utilizare, pentru dezinfectarea și curățarea instrumentelor rotative stomatologice și chirurgicale din oțel inoxidabil, carbură de tungsten, suprafață abrazivă de diamant, ceramică, polimer și silicon. OROLIN® Burbath are un spectru foarte larg de activitate și acționează rapid. OROLIN® Burbath este ușor biodegradabil.

Domeniu de utilizare



Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății și al medicinei dentare de către personal care detine cunoștințe specifice pentru dezinfectia dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienți.

Instrucțiuni de folosire



Pentru protecția dumneavoastră, purtați un halat de laborator, mănuși de menaj și ochelari de protecție. Scufundați instrumentele rotative imediat după utilizare în soluția dezinfectantă. Respectați, dar nu depășiți timpul de expunere indicat. După dezinfectare, lăsați instrumentele rotative să se usuce. A nu se clăti cu apă. Înlocuiți soluția dezinfectantă zilnic sau când este vizibil contaminată. Verificați vizual instrumentele după dezinfectare pentru a vedea agenții de contaminare. Dacă este necesar, îndepărtați agenții de contaminare cu o perie și repetați procesul de dezinfectare. Înlocuiți soluția de lucru zilnic sau când este vizibil contaminată. Soluția dezinfectantă este adecvată și pentru utilizarea într-un dispozitiv de curățare cu ultrasunete. Respectați recomandările de reprocesare ale producătorului instrumentului. Utilizați doar cu instrumente alcaline și compatibile cu alcoolul. Nu este compatibilă cu aluminiul. Pe site-ul nostru web există o listă cu materialele compatibile și incompatibile. Dacă nu sunteți siguri cu privire la compoziția materialelor dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul medical ar trebui raportate producătorului sau autorității competente.

Atenționare



NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu este destinat pentru dezinfectarea finală a dispozitivelor medicale semicritice și critice. Sterilizați dispozitivele medicale după dezinfectare. Nu amestecați cu alte produse. Pentru eficacitatea virucidă, efectuați dezinfectarea doar pe instrumentele curățate anterior.

Manipulare



Atenție H226 Lichid și vapori inflamabili. H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H336 Poate provoca somnolență sau amețelă. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. - Fumatul interzis. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa de date de securitate disponibilă pe

Depozitare



Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat. Feriți de expunerea directă la soare, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.

Proprietati fizice



Stare fizica: Lichid limpede, ne-vascos	Valoare pH: 13.0-14.0
Culoare: Incolor pana la usor galben	Perioada valabilitate: 36luni (recipient ne-deschis)
Miros: de aclool	

Compozitie in 100g



100 g conțin 32 g izopropanol, 0.7 g 2-fenoxietanol, 0.2 g compuși de amoniu cuaternar, inhibitori de coroziune, auxiliare și apă.



Spectru de eficienta

Bactericid	EN13727:2012+A2:2015* EN14561:2006*	30sec
Tuberculocid	EN14348:2005* EN14563:2008^	60sec
Micobactericid	EN14348:2005* EN14563:2008^	60sec
Levuricid	EN13624:2013* EN14562:2006*	30sec
Fungicid	EN13624:2013^ EN14562:2006^	60sec
Virucid pentru virusurile cu invelis lipidic	EN14476:2013+A1:2015* EN17111:2018^	15sec
Virucid	EN14476:2013+A1:2015^ EN17111:2018^	30sec



Compatibilitate



Acetal polimer	Compatibil
Sticla acrilica	Compatibil
Carbura	Compatibil
Ceramica	Compatibil
Clorura de polivinil clorurat	Compatibil
Granule de diamant	Compatibil
Diamant (acoperire cu carbon asemanatoare diamantului)	Compatibil
Diamant (acoperit cu aur)	Compatibil
Diamant (acoperire cu nitrid de zirconiu)	Compatibil
Metal dur	Compatibil
Polyamide	Compatibil
Polibutileneteroftalat	Compatible
Polieterimide	Compatibil
Polietinela	Compatibil
Polifenilenoxid	Compatibil
Polifenilsulfona	Compatibil
Polipropilena	Compatibil
Polisulfona	Compatibil
Policlorura de vinil	Compatibil
Polifluorura de vinilidena	Compatibil
Portelan	Compatibil
Carbura de siliciu	Compatibil cu restrictii
Silicone	Compatibil
Otel inoxidabil	Compatibil
Otel	Compatibil cu restrictii
Carbura de tungsten	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperire cu effect cromatic)	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperire cu carbon asemanatoare diamantului)	Compatibil
Carbura de tungsten (acoperire cu nitrid de zirconiu)	Compatibil
Polietilena cu greutate moleculara foarte mare	Compatibil
Dioxid de amoniu	Compatibil



Ambalaj



CH-061005	Flacon de 250ml
CH-061065	Flacon de 1L
CH-061070	Flacon de 1L
CH-061075	Canistra de 5L

Producător, Reprezentant UE, Importator, Distribuitor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Elvetia

 info@oroclean.com •  +41(0)442264444 •  www.oroclean.com



Oro Clean Chemie s.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Republica Ceha

 info@oroclean.cz •  www.oroclean.cz